


Vorbereitung und Einlegen des LT®evo bei der Reanimation

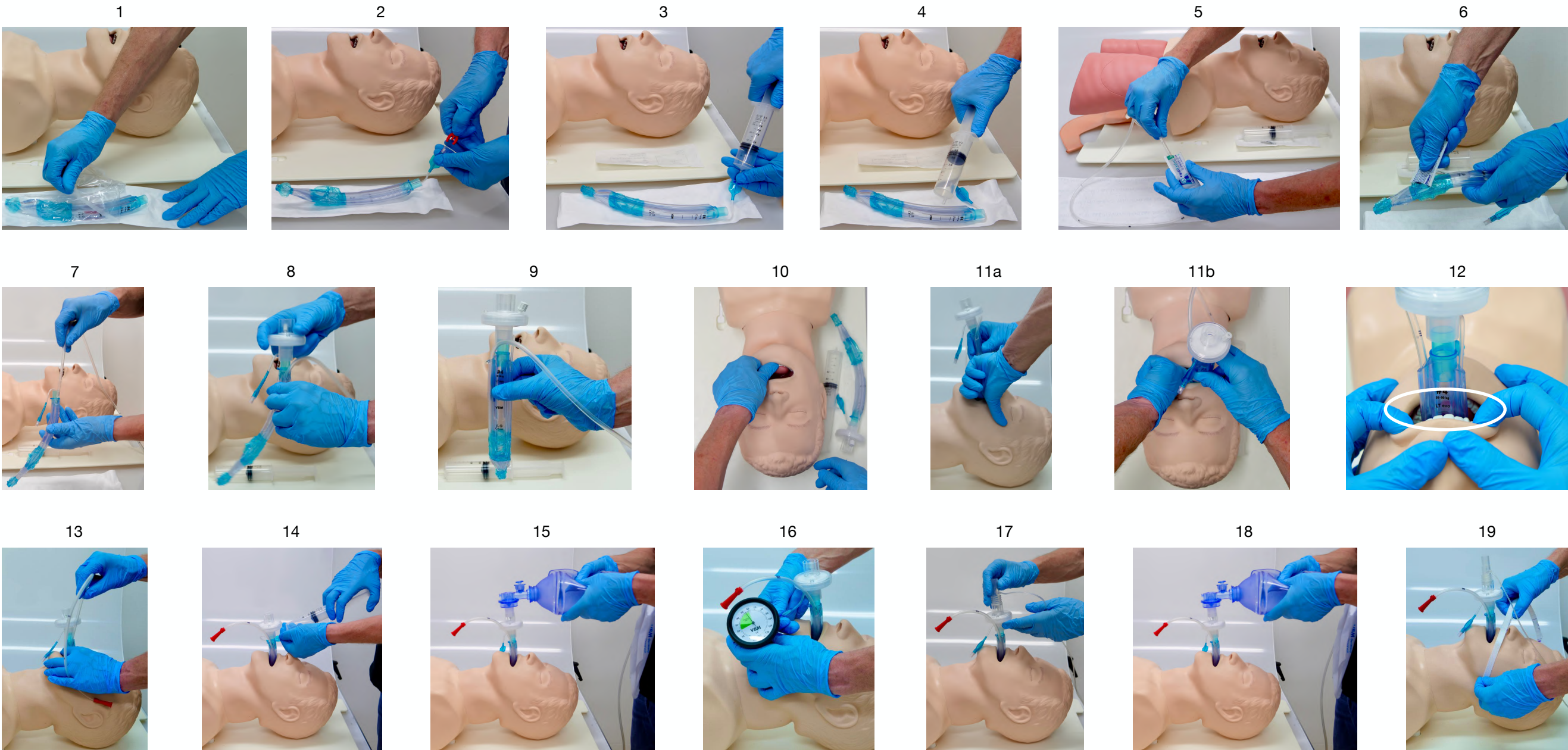

1	LT®evo auspacken
2	Ventilöffner entfernen
3	Cuffs durch komplette Entlüftung überprüfen (IFU)
4	Blockerspritze auf das notwendige Volumen aufziehen
5	Magensonde gleitfähig machen
6	LT®evo gleitfähig machen, beim distalen Cuff beginnen
7	Magensonde in LT®evo einlegen (distales Ende darf nicht aus dem LT®evo distal herausragen)
8	Atemsystemfilter konnektieren
9	LT®evo wie einen Stift an den Zahnmarkierungen halten
10	Mund mit dem Kreuzgriff öffnen
11a	Mit dem Zeigefinger Zunge und Unterkiefer anheben und so für pharyngealen Raum sorgen
11b	Griff aufrechterhalten bis LT®evo korrekt platziert ist
12	Korrekte Positionierung des LT®evo

13	Magensonde (MS) vorschieben bis noch ca. 20 cm der MS proximal aus dem LT®evo ragen (dient u. A. als Lagekontrolle)
14	Cuffs zügig mittels Blockerspritze mit Luft befüllen
15	Beatmungsbeutel anbringen und einmal beatmen (Funktionkontrolle)
16	Cuffdruck messen und auf einen Wert von maximal 60 cmH ₂ O einstellen
17	Kapnografieleitung konnektieren und kontinuierlich beachten
18	Beatmungsbeutel anbringen und Patienten asynchron zu den Thoraxkompressionen beatmen
19	LT®evo vor größeren Manipulationen fixieren (z. B. Umlagerung oder Transport)